

保証書・無償修理規定

- 取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理をさせていただきます。
①無償修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に本製品と本書をご持参、ご提示いただきお申しつけください。
②お買い上げの販売店で無償修理をご依頼できない場合には、(株)MTGお客様相談センターにお問い合わせください。
- ご転居した場合、修理のご依頼先は、お買い上げの販売店または(株)MTGお客様相談センターにお問い合わせください。
- ご贈答品などで本保証書に記載されている販売店に修理がご依頼になれない場合には、(株)MTGお客様相談センターにお問い合わせください。
- 保証期間内でも次の場合には有償修理になります。
イ) 使用上の誤り及び不当な修理や分解・改造による故障及び損傷
ロ) お買い上げ後の輸送、落下などによる故障及び損傷
ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害などによる故障及び損傷
二) 車両、船舶などに搭載された場合の故障及び損傷
ホ) 本書の提示がない場合
ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様のお名前、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
ト) 取扱説明書に記載されていない方法で使用した場合の故障及び損傷
チ) ご使用後のお手入れを怠ったことによる故障及び損傷
- 本書は日本国内においてのみ有効です。6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- ※お客様にご記入いただきました保証書記載の個人情報(お名前、ご住所、電話番号)は保証期間内のサービス活動、及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店、または(株)MTGお客様相談センターにお問い合わせください。
- ※保証期間後の修理などについて、詳しくは10ページの「保証・アフターサービス」をご覧ください。

株式会社MTG
〒453-0041 愛知県名古屋市中村区本陣通2丁目32番 MTG HIKARIビル <https://www.mtg.gr.jp>

[お客様相談センター] MTG製品のお問い合わせ・取扱い方法・その他ご不明な点は下記までお問い合わせください。

0120-315-332 〒453-0041 愛知県名古屋市中村区本陣通4丁目13番
MTG 第2HIKARIビル

※携帯電話・PHSからもご利用頂けます。[受付／9:30～17:30 土・日・祝日・弊社休業日を除く月～金曜日]

※都合によりお休みをいただく場合もあります。ご了承ください。

●ご相談窓口における個人情報のお取り扱い


(株)MTGは、ご相談への対応や修理、その確認などのために、お客様の個人情報やご相談内容を記録に残すことがあります。また、個人情報は適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。

ReFa

SPECIALIST

業務用

取扱説明書

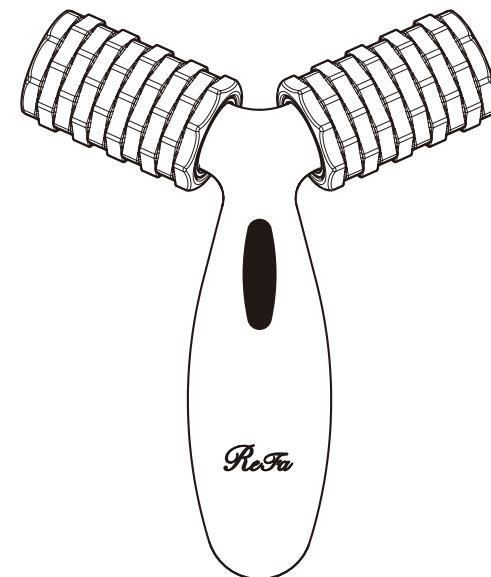

もくじ

安全上のご注意 P1～3
使用上のご注意 P4
ご使用の前に P5
正しい使い方 P5～P8
各部の名称 P9
お手入れ方法 P9
製品仕様 P10
保証・アフターサービス P10
保証書・無償修理規定 裏表紙

リファ スペシャリスト
品 番：PES-L1612

- このたびは、「リファ スペシャリスト」をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
- 本製品は業務用商品として店舗・施設にて美容技術者の使用を目的に開発された製品です。
- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書には保証書がついています。
「お買い上げ日、販売店名」などの記載があるかを必ず確かめ、お読みになられたあとも大切に保管してください。

安全上のご注意

ご使用の前に、必ずこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。ここに示した注意事項は、あなたや他の方々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全に正しくお使いいただくために守って頂きたい事項です。その表記と図記号の意味は次のようになっています。

■誤った使い方をしたときの危害や損害の程度を、以下の表示で区分して説明しています。



警告

誤った使い方をすると、「人が死亡または重症を負う可能性が想定される」内容を示します。



注意

誤った使い方をすると、「人が損傷を負う可能性や、物的損害の発生が想定される」内容を示します。

※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットに関わる拡大損害を示します。



禁止

「一般的な禁止」を示します。具体的な禁止内容は、の近くに文章や絵で示します。

次のような場合や、部位には使用しないでください。

事故や肌・身体のトラブルを生じるおそれがあります。

●体調がすぐれない場合。

●飲酒や薬を服用中の場合や疲労の激しい場合。

●傷口、目や口等の粘膜部位。

●肌に湿しん、はれもの、にきび、化膿性疾患のある場合、及びその部位。

●皮膚炎、過度の日焼けなど、皮膚に異常のある場合、及びその部位。

●当日、脱毛処理をした部位。

●整形手術をした部位。

●金属・プラスチック・シリコンなどを埋め込んである部位。

●分解、改造、修理はしないでください。

事故やケガの原因になるおそれがあります。

※修理はお買い上げの販売店または(株)MTG お客様相談センターにお問い合わせください。

●電子レンジや高圧容器には入れないでください。
事故やケガの原因になるおそれがあります。

●火気には近づけないでください。
事故やケガの原因になるおそれがあります。

【免責事項について】


火災、地震、暴動、テロなどの行為、その他の事項など、お客様の故意、または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して当社は一切責任を負いません。

⚠ 注意




- 用途以外の使用はお止めください。
- 本体を落としたりぶつけたりして損傷した場合は使用しないでください。ケガや故障の原因になるおそれがあります。
- お子様の手の届かないところに保管し、使用させないでください。事故やトラブルの原因になるおそれがあります。
- ペットへのご使用はお止めください。


1.ドライヤーやファンヒーターなどの暖房器具で、本体を乾燥させないでください。部品の変形、故障の原因になります。

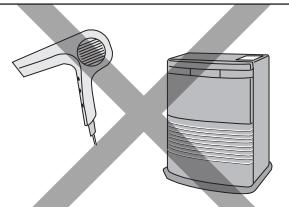

2.直射日光のある場所や高温場所に放置しないでください。本体内の防水パッキンが劣化し、防水機能が維持できず、故障の原因になります。

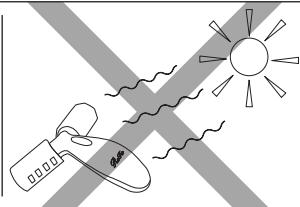

3.シンナー・ベンジン・アルコールなどでは、拭かないでください。部品の変色や割れなど、故障の原因になります。

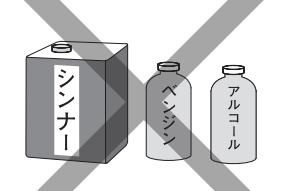

4.ご使用された後は、湿気の少ないところに保管してください。故障の原因になります。



使用上のご注意


ご使用前に以下の項目をよく読んでお使い下さい。



本製品は肌を吸い上げる構造上、ローラーを強く押し付けると皮膚を挟み傷つけるおそれがあります。



肌にあてる角度と強さを工夫することで、挟み込みを軽減することが出来ます。
下側に引く時に挟まる場合
ハンドルを立てた状態でご使用ください。

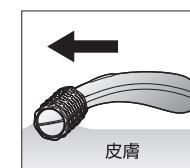

ハンドルを寝かせた状態でご使用ください。
上側に押す時に挟まる場合

●お肌をいためたり、本製品が破損するおそれがありますので、無理な力を加えないでください。

●使い始めは軽めに当てる、肌の様子を見ながらご使用ください。

●使用中または使用後に赤み、はれ、かゆみなどの異常があらわれた場合は使用を中止し、皮膚科専門医などにご相談ください。ご心配な方は、本製品の使用前に二の腕など目立たないところでお試しいただき、異常が出ないことを確認してからお使いください。

●お風呂の中で使用する場合は、水道水以外のお湯で使用しないでください。入浴剤やお湯の成分によっては変色等のおそれがあります。

●変形などのおそれがありますので、冷やしたり、温めたりしてからの使用をお止めください。また、熱湯やサウナでの使用などで本製品に急激な温度変化をさせることはお止めください。

●スクラブ剤や硫黄成分配合のクリームなどの併用はお止めください。変色、変質のおそれがあります。

●ソーラーパネルを強く押さないでください。故障の原因になります。

●キャップは取り外しが出来る構造になっておりますが、お客様自身では取り外さないでください。万が一外れた場合は、しっかりと取り付けをしていただなか、(株)MTGお客様相談センターへお問い合わせください。

●使用効果には個人差があります。

ご使用の前に

1. アクセサリー類(ネックレス、ピアス等)は巻き込みの危険がありますので、ご使用時は外してください。
2. 髪を巻き込まないよう、束ねるか、ヘアバンドなどで固定してご使用ください。また、短い髪の場合もクリップなどで固定してください。
3. 耳周りの髪は、特に巻き込みやすいのでご注意ください。


正しい使い方

●ローリングは4~5回を目安に行ってください。

●施術は常に右半身から始めてください。


●施術の際は必ず、本製品をお持ちでない手をお客様の肌に触れて施術を行ってください。

※触れていないとマイクロカレントの伝導が無くなります。

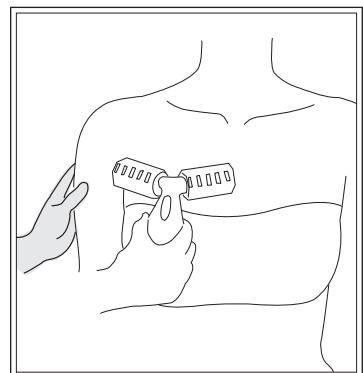


デコルテ～フェイス


1

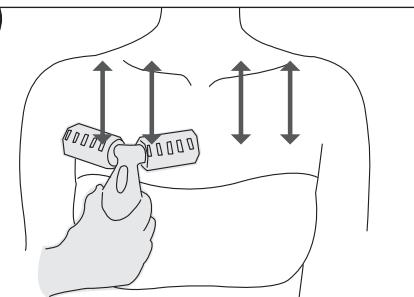


2

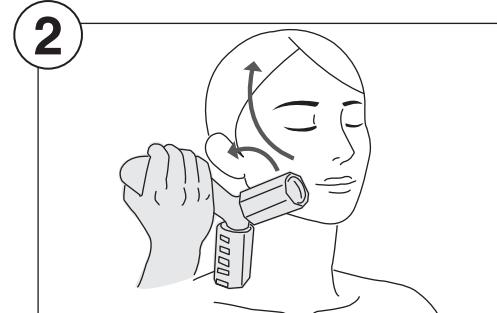

3

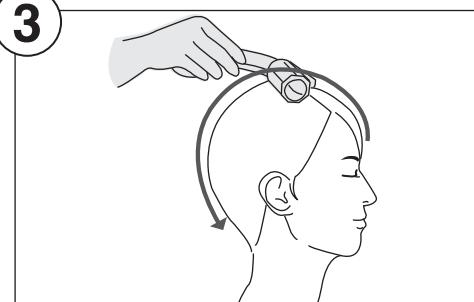

4

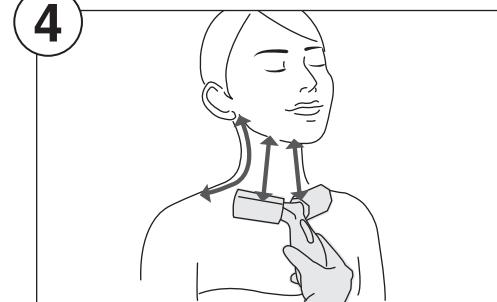


胸から鎖骨に向かって全体を上下にローリング。

※髪を巻き込まないよう、束ねるか、ヘアバンドなどで固定してご使用ください。
また、短い髪の場合もクリップなどで固定してください。


本製品の向きを変え、片側のローラーを顔に当てるようにして、口角から耳の下、鼻の横から頬骨を通じて頭までローリング。

※あごの骨やほほの骨の周りは、肌の保護のため、弱い力で当ててください。


下半身

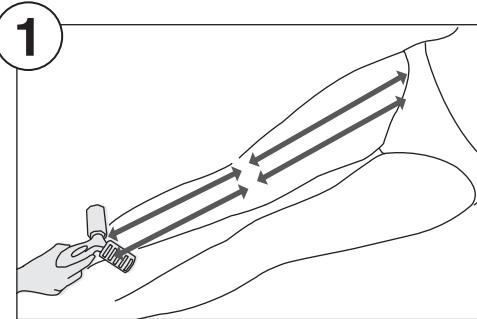


足首から膝下まで、膝上から太股全体を通り、足の付け根へ向けてローリング。

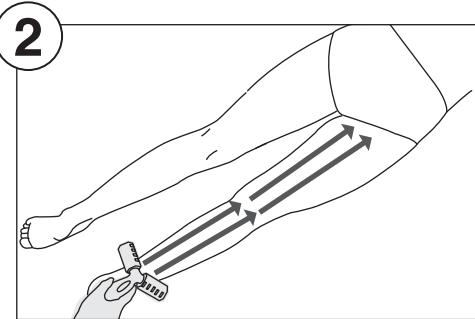

うつ伏せになって頂き、足首から膝裏まで、膝裏からヒップまで太股全体をローリング。

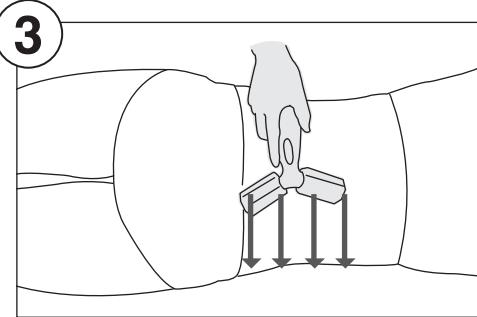


背面から側面に向け、全体をローリング。

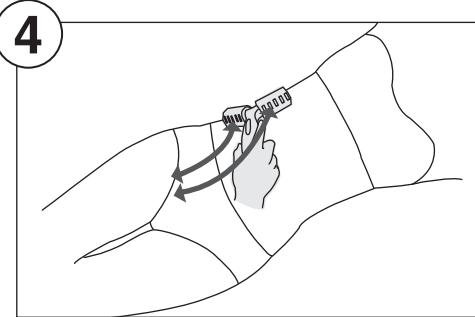


ウエスト側面から足の付け根へ向けてローリング。


上半身

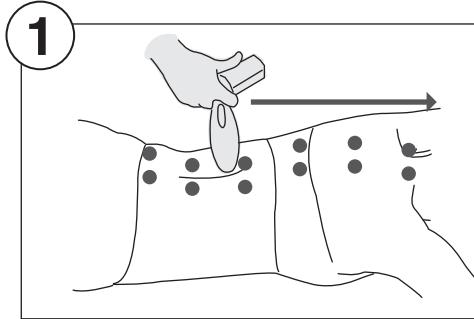


背骨のすぐ横を、腰から肩へ移動しながらハンドルで押圧する。

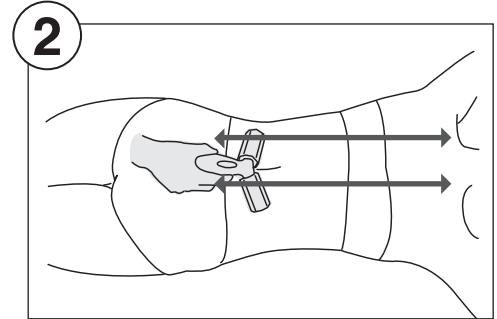


ReFaのV字中央を背骨ラインに合わせて、ヒップから肩にかけローリング。

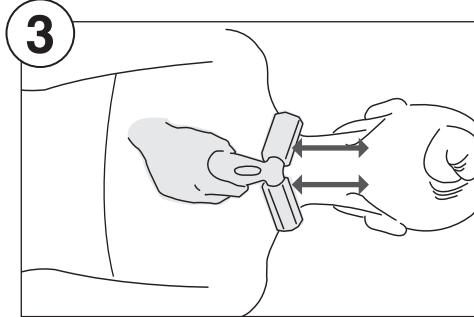


首から肩を上下にローリング。

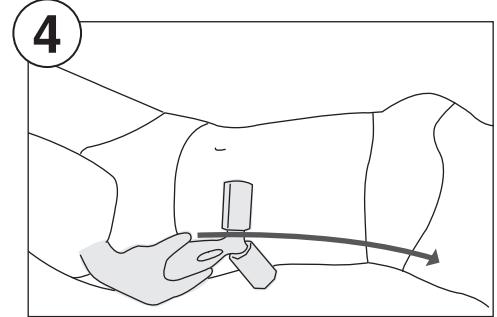

仰向けになって頂き、ウエストラインから脇の下までをやさしくローリング。

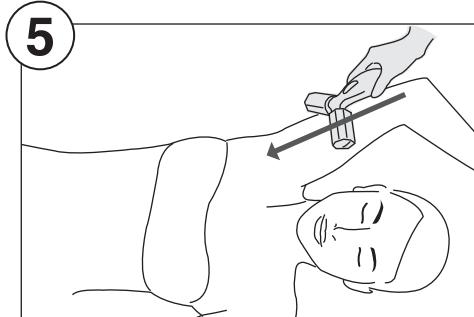


手を上げ、二の腕を脇の下までもみほぐす。

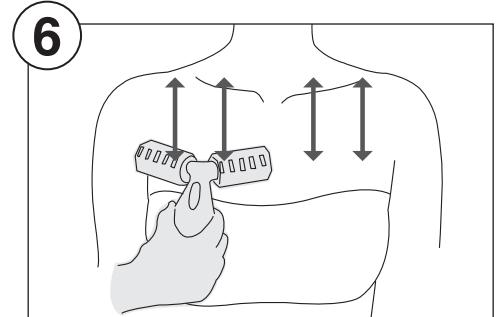


胸から鎖骨に向かって、全体を上下にローリング。

各部の名称

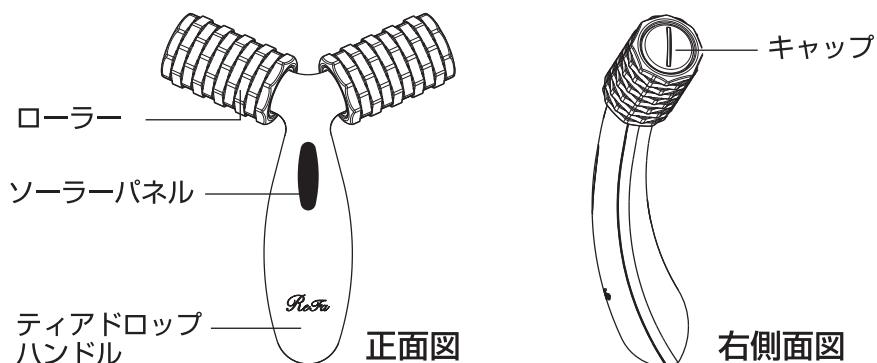


お手入れ方法

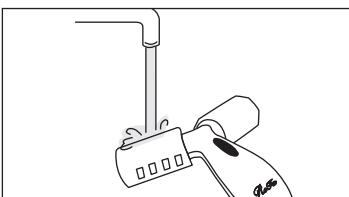


ローラー・本体を水洗いする

お湯で洗う場合、温度は50°C以下で行ってください。
洗剤などは使用しないでください。
汚れが気になる場合は、中性洗剤を水で薄めて、柔らかい布に少し染み込ませてから拭き取ってください。

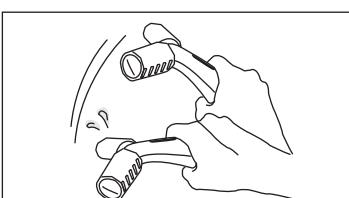


ローラー本体を数回振って、 内部の水を抜き取る

ローラーや本体の隙間等から水が出てくる事がありますが、故障ではありません。

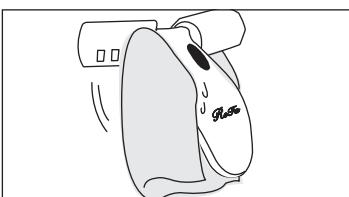

本体が傷つかない柔らかい布で水滴を 丁寧に拭き取る

貴金属用つや出し布などの研磨剤入りの布や、
ウェットティッシュ等のアルコール入りのもの
の使用はお止めください。

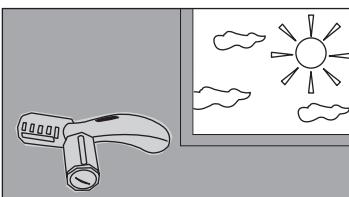

風通しの良い日陰で自然乾燥させる

製品仕様

商品名	プラチナ電子ローラー® ReFa SPECIALIST (リファ スペシャリスト)	材質	・ABS樹脂・真鍮・アクリル ・シリコンゴム・アルミニウム ・プラチナムコート=Pt
品番	PES-L1612	重量	約295g
サイズ	(横)約154mm×(縦)約184mm× (奥行)約58mm	防水性	JIS防水保護等級 IPX7に準拠

保証・アフターサービス

保証について

保証書は、この取扱説明書の裏表紙に記載されております。
保証書は必ず「お買い上げ日、販売店名」などの記入をお確かめになり、保証書の内容をよくお読みになった後、大切に保管してください。

保証期間

保証期間はお買い上げ日から1年間です。

※ご使用中に異常が生じたときは、お買い上げの販売店、または(株)MTGお客様相談センターへお問い合わせください。

補修用性能部品の最低保有期間

本製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後6年です。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるときは

●保証期間中

お買い上げになってから1年間は保証書記載の内容に基づき無償修理いたします。
お買い上げの販売店、または(株)MTGお客様相談センターまで保証書をご提示のうえ、ご依頼ください。

●保証期間(1年間)が過ぎているとき

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店、または(株)MTGお客様相談センターまでお問い合わせください。
お客様のご要望により有償修理いたします。